



# Istruzioni d'uso mascherine chirurgiche

## ⚠ AVVERTENZE GENERALI PER L'UTILIZZATORE ⚠

La mascherina è monouso e personale e non va in nessun caso riutilizzata, va sostituita nel caso in cui si inumidisce con il respiro. Non utilizzare per un periodo superiore ad **8 ore**. Non utilizzare in caso di presenza di difetti evidenti al prodotto.

### MASCHERINA CHIRURGICA

Modello: **CzFM-19**

Tipo: **II R**

La mascherina è un dispositivo medico NON sterilizzato.

### DESTINAZIONE D'USO

Queste mascherine vengono utilizzate per prevenire e limitare la diffusione delle malattie respiratorie.

### MODALITA' D'USO

È importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero trovarsi su di essa.

**Prima di indossare o rimuovere la mascherina assicurarsi di eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani!**

Per indossare correttamente la mascherina:

- Lavare le mani accuratamente, mediante utilizzo di sapone o disinfettante per le mani.
- Afferrare la mascherina dagli elastici disposti alle estremità della mascherina, e sistemarla sul viso comprendo naso e bocca.
- Inserire le dita negli elastici e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie.
- Fare aderire bene la maschera al viso, tirandola alle estremità superiore ed inferiore per aprire le pieghe e distenderla completamente fin sotto al mento.

Evitare, se possibile, di toccare la mascherina durante il suo utilizzo per non comprometterne l'efficacia. Se proprio necessario, effettuare un lavaggio delle mani prima e dopo il contatto.

### RIMOZIONE E SMALTIMENTO MASCHERINA

- Lavare le mani accuratamente, mediante utilizzo di sapone o disinfettante per le mani;
- Afferrare gli elastici dietro le orecchie e riportarli avanti;
- Portare lentamente in avanti le mani, per agevolare la rimozione della mascherina dal viso;
- Avendo cura di non toccare l'interno della mascherina gettarla nel rifiuto indifferenziato;
- Lavare nuovamente le mani.

### CONFEZIONE E IMBALLO

Le mascherine sono confezionate singolarmente in busta trasparente. L'imballo riporta le informazioni relative al fabbricante, al prodotto, al lotto di produzione e la data di scadenza.

### CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

Il periodo di validità del prodotto adeguatamente conservato è di **2 anni** dalla data di produzione.



### Dichiarazione UE di Conformità del dispositivo medico

Fabbricante:	EngiNe s.r.l.
Sede:	Via Vittorio Veneto 15 - 01100 Viterbo (VT)
N.ro registrazione:	1985069

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il dispositivo:

Materiale:	Tessuto non tessuto (TNT) a tre strati
Classe di rischio:	1
Tipo:	II R
Composizione:	Strato di Spunbond da 25 g/m <sup>2</sup> blu Strato di Melblown Spray 25 g/m <sup>2</sup> bianco Strato di Spunbond da 25 g/m <sup>2</sup> bianco
Dimensioni:	17 x 9,5 cm
Proprietà:	Efficienza filtrazione batterica (BFE): > 98 % Pressione differenziale: < 60 Pa/cm <sup>2</sup> Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16 kPa Pulizia microbica (Bioburden): ≤ 30 CFU/g

è conforme al seguente regolamento comunitario:

Regolamento 2017/745/UE

e alle seguenti norme armonizzate (SC) applicate:

EN 14971:2020  
EN 10993-1:2010  
EN 14683:2019

Angelo Dionisi  
(Legale Rappresentante)



## ⚠ AVVERTENZE ⚠

Non disperdere nell'ambiente. Il prodotto va gettato nel rifiuto secco indifferenziato



**CzFM-19**

**MADE IN ITALY**