



Istruzioni d'uso mascherine chirurgiche

⚠ AVVERTENZE GENERALI PER L'UTILIZZATORE ⚠

La mascherina è monouso e personale e non va in nessun caso riutilizzata, va sostituita nel caso in cui si inumidisce con il respiro. Non utilizzare per un periodo superiore ad **8 ore**. Non utilizzare in caso di presenza di difetti evidenti al prodotto.

MASCHERINA CHIRURGICA

Modello: **CzFM-19**

Tipo: **II**

La mascherina è un dispositivo medico NON sterilizzato.

DESTINAZIONE D'USO

Queste mascherine vengono utilizzate per prevenire e limitare la diffusione delle malattie respiratorie.

MODALITA' D'USO

È importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero trovarsi su di essa.

Prima di indossare o rimuovere la mascherina assicurarsi di eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani!

Per indossare correttamente la mascherina:

- Lavare le mani accuratamente, mediante utilizzo di sapone o disinfettante per le mani.
- Afferrare la mascherina dagli elastici disposti alle estremità della mascherina, e sistemarla sul viso comprendo naso e bocca.
- Inserire le dita negli elastici e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie.
- Fare aderire bene la maschera al viso, tirandola alle estremità superiore ed inferiore per aprire le pieghe e distenderla completamente fin sotto al mento.

Evitare, se possibile, di toccare la mascherina durante il suo utilizzo per non comprometterne l'efficacia. Se proprio necessario, effettuare un lavaggio delle mani prima e dopo il contatto.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO MASCHERINA

- Lavare le mani accuratamente, mediante utilizzo di sapone o disinfettante per le mani;
- Afferrare gli elastici dietro le orecchie e riportarli avanti;
- Portare lentamente in avanti le mani, per agevolare la rimozione della mascherina dal viso;
- Avendo cura di non toccare l'interno della mascherina gettarla nel rifiuto indifferenziato;
- Lavare nuovamente le mani.

CONFEZIONE E IMBALLO

Le mascherine sono confezionate singolarmente in busta trasparente. L'imballo riporta le informazioni relative al fabbricante, al prodotto, al lotto di produzione e la data di scadenza.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

Il periodo di validità del prodotto adeguatamente conservato è di **2 anni** dalla data di produzione.



Dichiarazione UE di Conformità del dispositivo medico

Fabbricante:	EngiNe s.r.l.
Sede:	Via Vittorio Veneto 15 - 01100 Viterbo (VT)
N.ro registrazione:	1985069
DICHIARA <i>sotto la propria responsabilità che il dispositivo:</i>	
Materiale:	Tessuto non tessuto (TNT) a tre strati
Classe di rischio:	1
Tipo:	II
Composizione:	Strato di Spunbond da 25 g/m ² blu Strato di Melblown Spray 25 g/m ² bianco Strato di Spunbond da 25 g/m ² bianco
Dimensioni:	17 x 9,5 cm
Proprietà:	Efficienza filtrazione batterica (BFE): > 98 % Pressione differenziale: < 40 Pa/cm ² Pressione di resistenza agli spruzzi: non richiesta Pulizia microbica (Bioburden): ≤ 30 CFU/g
<i>è conforme al seguente regolamento comunitario:</i>	
Regolamento 2017/745/UE	
<i>e alle seguenti norme armonizzate (SC) applicate:</i>	
EN 14971:2020 EN 10993-1:2010 EN 14683:2019	
 Angelo Dionisi (Legale Rappresentante)	



⚠ AVVERTENZE ⚠

Non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto va gettato nel rifiuto secco indifferenziato



CzFM-19

MADE IN ITALY